


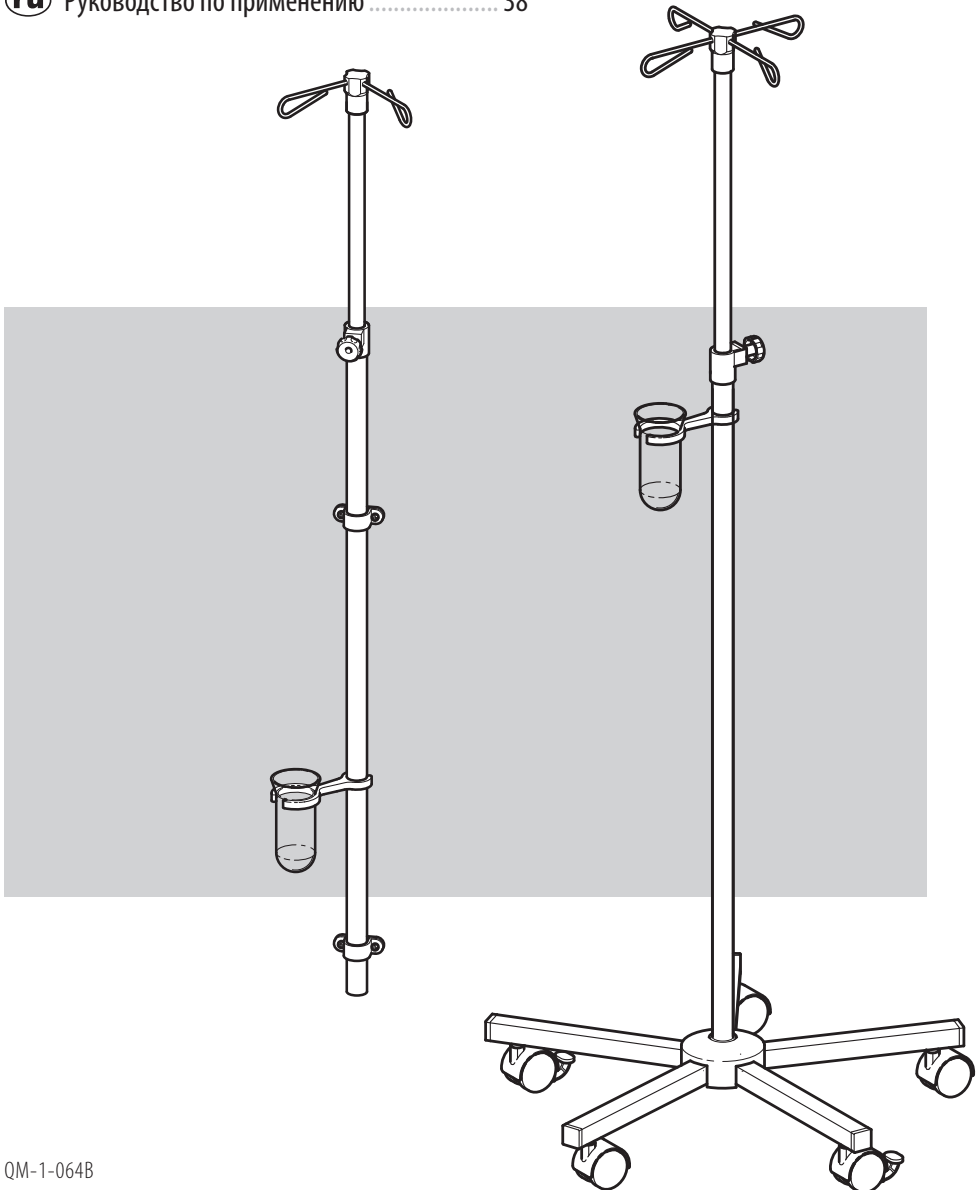


de	Gebrauchsanweisung	2
en	User's Manual	8
fr	Mode d'emploi	14
it	Istruzioni per l'uso	20
es	Instrucciones de empleo	26
pt	Manual de operação	32
ru	Руководство по применению	38

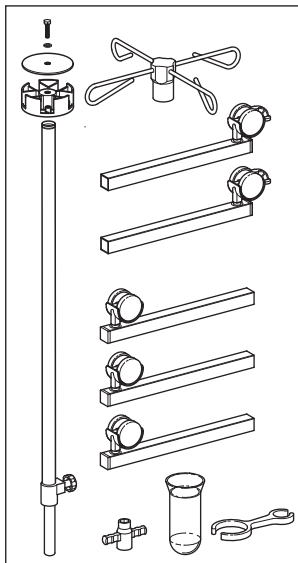


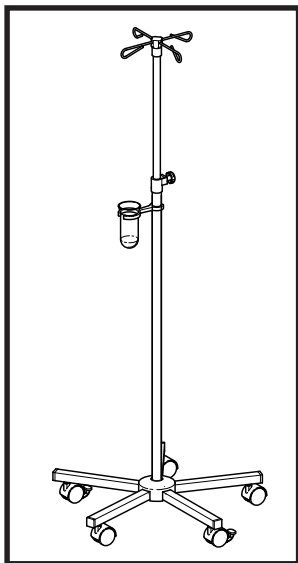


Комплектующие

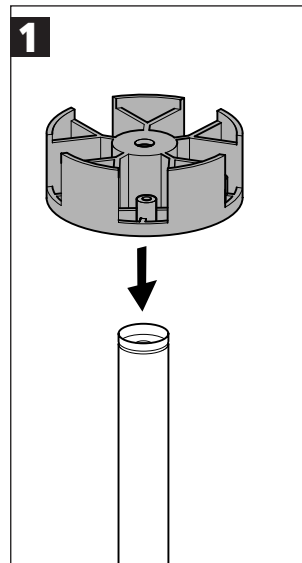


1. Насадите блок.

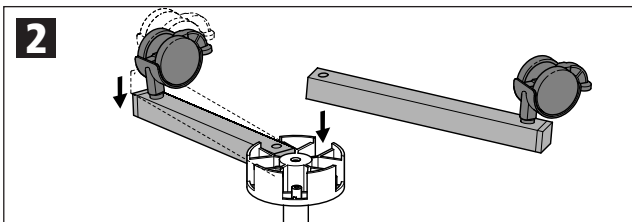


2. Навесьте две прямоугольные трубы с блокировочными роликами друг против друга.

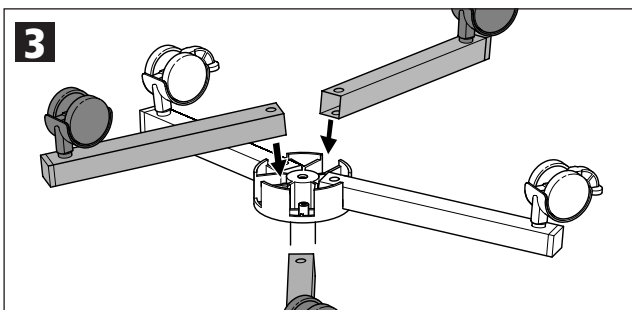


3. Навесьте три прямоугольные трубы без тормозных роликов.

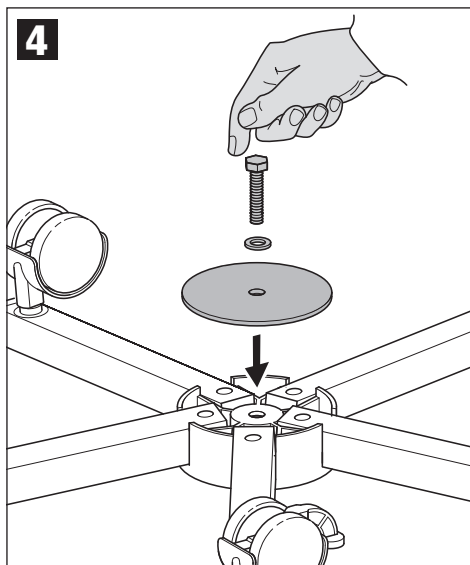


4. Вкрутите винт с шестигранной головкой.

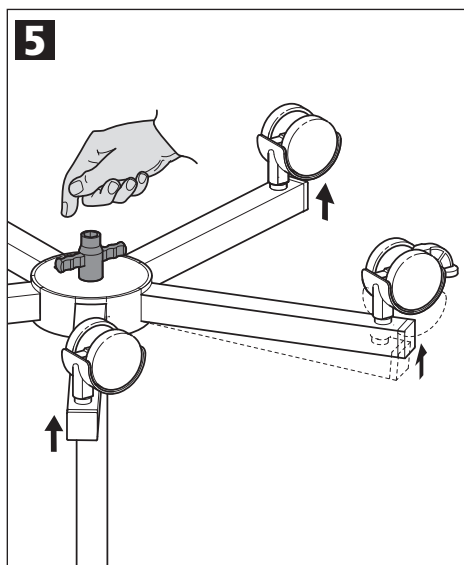


5. Закрепите винт с шестигранной головкой.

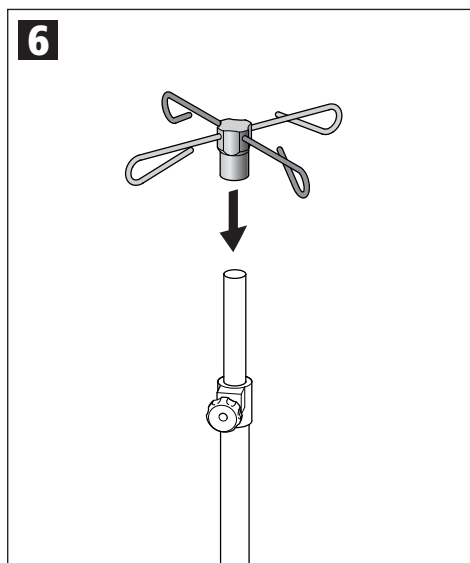


6. Насадите крючки из высококачественной стали.

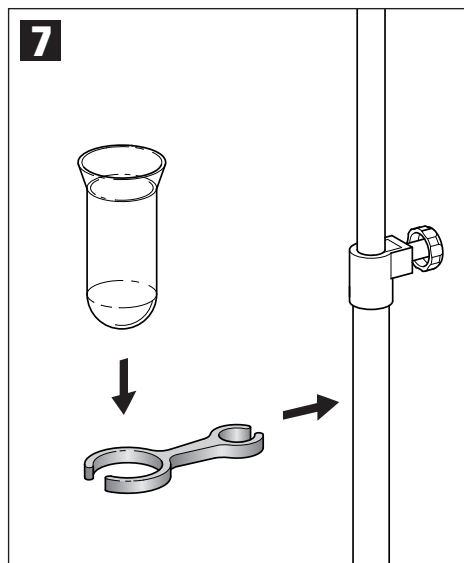


7. Насадите держатель на штатив и вставьте в него стакан.

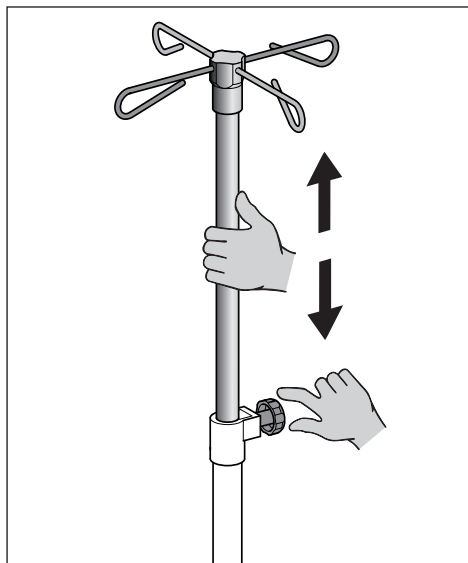



Установите высоту.

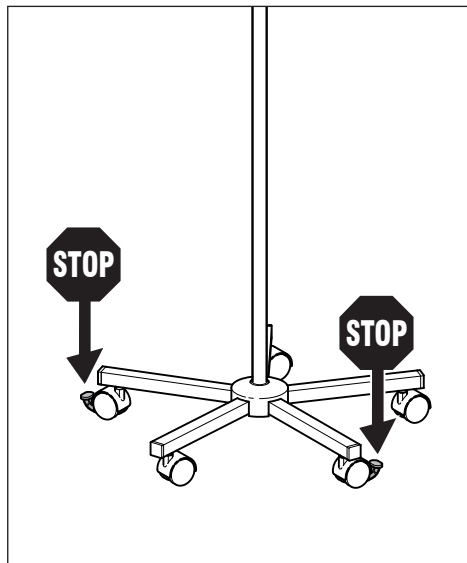


Зафиксируйте стопорные колеса.

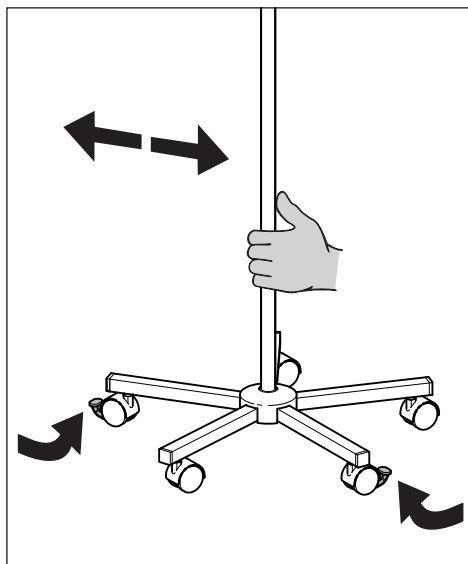


↔ Для поступательного движения блокировочные ролики освободите от стопора.

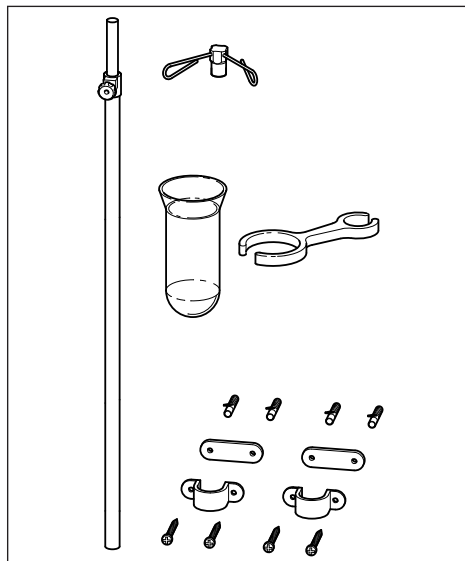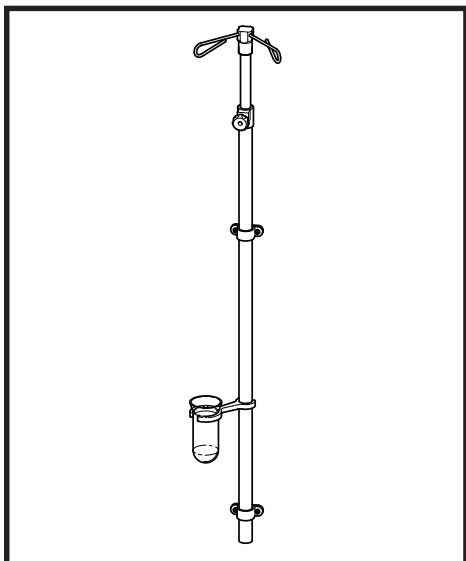


Комплектующие

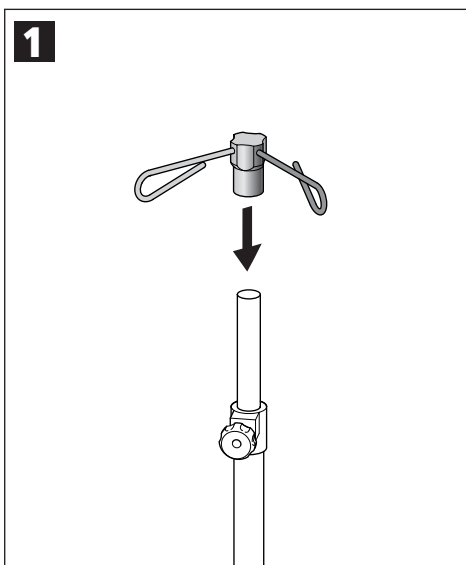


1. Насадите крючки.

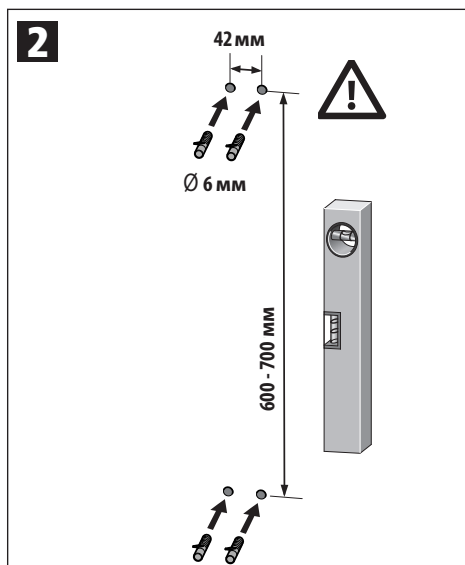


2. Просверлите 4 отверстия и вставьте дюбель. *Осторожно!*
Проверьте наличие электро-, газо- и водопровода в стене.

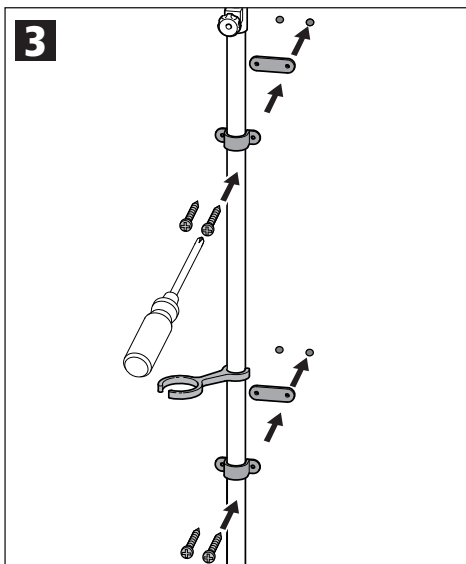3

3. Укрепите держатель для стакана и прикрутите инфузионную стойку.

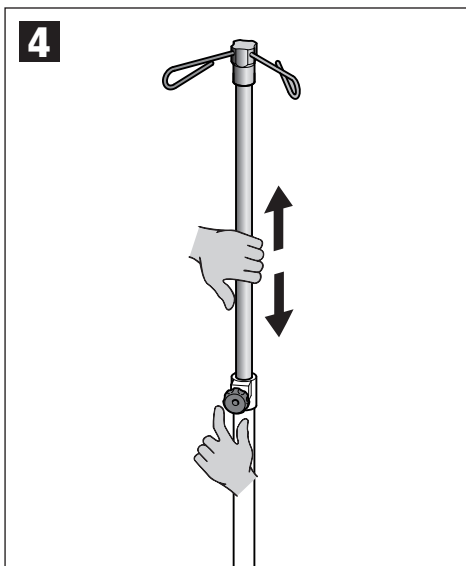
4

4. Установите высоту.

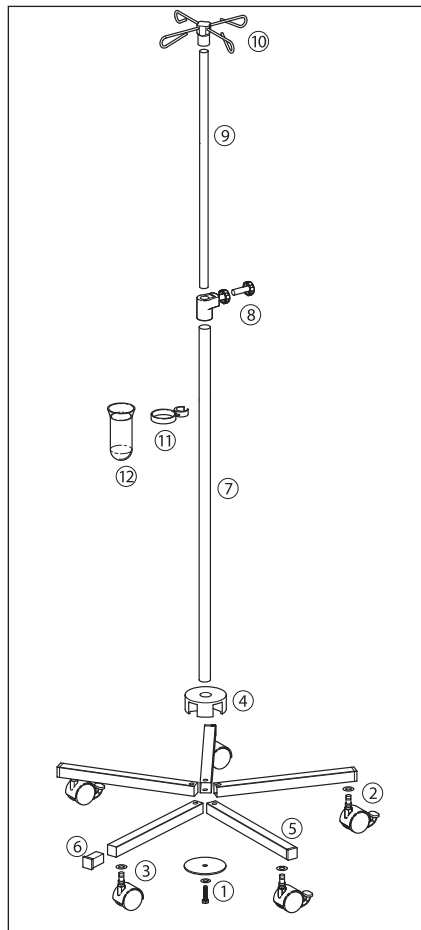

Запасные части

- | | |
|---|---|
| 1 | Крепёжная пластина в комплекте с винтом и шайбой |
| 2 | Тормозные колёса |
| 3 | Стопорные колёса |
| 4 | Крестовина
чёрная (модель из нержавеющей стали)/
синяя (хромированная модель) |
| 5 | Прямоугольная трубка |
| 6 | Заглушка
чёрная (модель из нержавеющей стали)/
синяя (хромированная модель) |
| 7 | Штатив |
| 8 | Зажим
чёрный (модель из нержавеющей стали)/
синий (хромированная модель) |

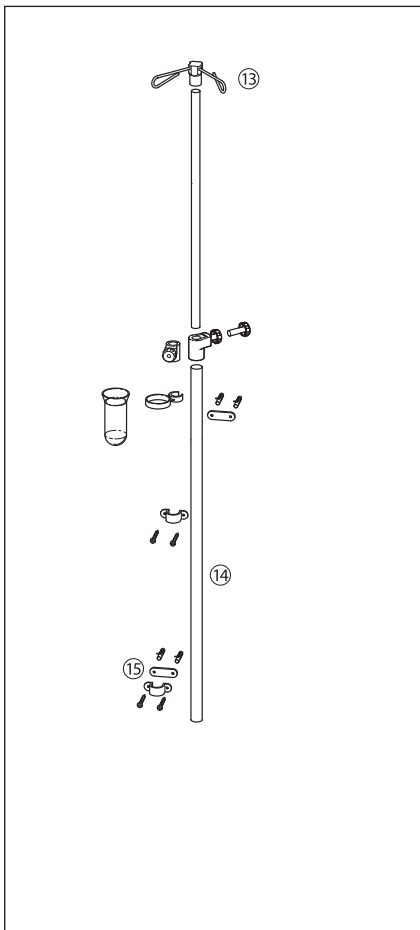

9	Телескопический штатив
10	Стандартный держатель на 4 крючка чёрный (модель из нержавеющей стали)/синий (хромированная модель)
11	Держатель для стакана
12	Стакан для сливания остатков растворов
13	Держатель на 2 крючка
14	Телескопический штатив
15	Пластиковая скоба для крепления на стену в комплекте с шурупом и дюбелем

Назначение: Для введения инфузионных растворов. Максимальная нагрузка на крючки для подвешивания флаконов не должна превышать 2 кг.

Гарантия: При правильном использовании и учете нашего руководства по применению, мы предоставляем 2 года гарантии со дня продажи. При возникновении вопросов или в случае возможного ремонта, обратитесь к Вашему продавцу в сети специализированной торговли!

⚠ Требования техники безопасности:

- Инфузионную стойку применять только в исправном состоянии.
- Инфузионную стойку устанавливать только на ровной поверхности. Стопорные колеса зафиксировать. Устойчивость гарантирована при нагрузке до 2 кг и 10 % наклоне.
- Для передвижения стопорные колеса разблокировать.
- 4 крючка предназначены только для подвешивания инфузионных флаконов.
- За несоответствующее назначению применение, ответственность несёт исключительно пользователь.

CE-Маркировка: Данное изделие фирмы KaWe отвечает требованиям EG-93/42/EWG (директива по медицинским приборам).

Технические данные:

Максимальная высота	прибл. 210 см
Диаметр основания стойки	прибл. 60 см
Вес инфузионной стойки из нержавеющей стали	прибл. 2,9 кг
Вес хромированной инфузионной стойки	прибл. 2,6 кг

Дополнительную информацию о продукции фирмы KaWe смотрите на нашем сайте: www.kawemed.de.



Очистка: 1. Чистящее средство на алкогольной основе. 2. Не использовать средства, содержащие кислоты. 3. Очистка вручную, например, с помощью растворов Helipur, Baktolan или Sagrotan согласно предписаниям завода производителя. 4. Загрязнения удалять немедленно. 5. Загрязненные ролики чистить, во избежание статической зарядки. 6. Не применять автоматическую очистку. 7. Нет необходимости в стерилизации.

Обслуживание: 1. Проводить регулярную визуальную и функциональную проверку всех сборных частей – поврежденные части заменить. 2. При необходимости подтянуть винты.

Оставляем за собой право вносить технические изменения.

kompetenz in medizintechnik
weltweit



KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56 • 71679 Asperg • Germany

Zentrale / Switchboard

Fon: +49 -7141-68188-0

Fax: +49 -7141-68188-11

eMail: info@kawemed.de

Internet: www.kawemed.de